

Opis izdelka

Polnilnik Charger Plus MNB T R

Polnilnik Charger Plus za Alpha miniBTE T R je zasnovan tako, da je enostaven za uporabo tako doma kot na poti. Pokrov polnilnika služi kot zaščita in shranjevanje za slušne aparate, polnilna vgrajena litij-ionska baterija pa omogoča uporabo polnilnika Charger Plus kot napajalnik, ko ni na voljo napajanja.

Napajalnik za Viron miniRITE T R deluje na indukcijsko tehnologijo, ki omogoča brezstično polnjenje dveh slušnih aparatov preko indukcijske zanke. Magnetni stik v napajalniku preprečuje izklop slušnega aparata. Ob vstavitvi aparata v napajalnik se polnjenje začne samodejno. Ko vzamete aparat iz napajalnika, ga vključite: ON.



Packaging set

- Navodila za uporabo
- Vtičnica za napajanje
- USB kabel

Čas polnjenja slušnega aparata (ko je popolnoma izpraznjen)

- 3,5 h = povsem napolnjen
- 1 h = 40 % napolnjen
- 30 min = 20 % napolnjen

¹ Napajalna vtičnica se lahko razlikuje od države do države

Napajalnik Charger Plus MNB T R – Tehnični podatki

Polnilnik Charger Plus MNB T R

Zasnovan za združljivost	Alpha, miniBTE T R
Dimenzije	Višina 76,4 mm / širina 47,2 mm / dolžina 95 mm
Teža	180 gramov (6,4 oz)
Barva	Črna
Vtičnica za napajanje	USB A
Oznake stanja	LED lučka na polnilniku, ko je priključen na napajanje: Označuje stanje polnjenja prenosne baterije LED lučka na polnilniku, ko je izključen iz napajanja: Označuje nivo stanja prenosne baterije. LED lučka na slušnih aparatih med polnjenjem: Označuje način polnjenja
Čas polnjenja slušnih aparatov	Največ 3,5 ure, odvisno od začetnega stanja baterije (temperatura: +10 °C do +35 °C (+50 °F do +95 °F)) Največ 5 ur, odvisno od začetnega stanja baterije (temperatura: +5 °C do +10 °C (+41 °F do +50 °F) / +35 °C do +38 °C (+95 °F do +100 °F))
Čas polnjenja prenosne baterije	Največ 4 ure polnjenja, odvisno od začetnega stanja baterije Temperatura +10 °C to +35 °C (+50 °F to +95 °F)
Vir napajanja	Priložena napajalna enota
Vhodna napetost	5 V DC
Vhodni tok	Max. 1A (polnjenje notranje baterije in 2 slušnih aparatov)
Kabel	Snemljiv kabel / 150 cm
Priključen na zunanjo opremo	Ko je ta oprema priključena na zunanjo opremo, ki je priključena na stensko vtičnico, mora biti ta oprema v skladu z IEC-62368 ali enakovrednimi varnostnimi standardi.

Pogoji uporabe

Pogoji delovanja	Temperatura +5 °C to +38 °C (+41 °F to +100 °F) Relativna vlaga: 5 % to 93 %, brez kondenza
Pogoji za shranjevanje in transport	Temperatura -25 °C to +60 °C (-13 °F to +140 °F) Relativna vlaga: 5 % to 93 %, brez kondenza
Zračni tlak	700 hPa do 1060 hPa

Tehnični podatki: Napajalna enota

Vhodna napetost	100 – 240 V AC
Vhodna frekvenca	50 – 60 Hz
Izhodna napetost	5 V DC
Izhodni tok	1 A



Izdelovalec

SBO Hearing A/S

Kongebakken 9
DK-2765 Smørum
Danska

Sedež podjetja

Bernafon AG

Morgenstrasse 131
3018 Bern
Švica
Telefon +41 31 998 15 15
info@bernafon.com
www.bernafon.com